

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

35_20230608_DK

One Way



One Way Open



One Way Tube



One Way - Pull Strap



Vare nr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-1266	134575	One Way Open - S	5744001974278
MC 001-1272	134576	One Way Open - M	5744001974285
MC 001-1276	134577	One Way Open - L	5744001974292
MC 001-1277	81135	One Way Open - Pull Strap	5744001970317
MC 001-1286	136363	One Way Tube - S	5744001974766
MC 001-1291	134574	One Way Tube - M	5744001974247
MC 001-1296	136364	One Way Tube - L	5744001974773

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 19

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges hos brugere med tendens til at glide frem på sædet i kørestolen. Produktet kan benyttes til at glide bagud, men konstruktionen hindrer glidepuden i at glide fremad. Produktet skal genplaces efter 2-3 tilbageforflytninger.

Advarsel:

Produktet skal bruges med forsigtighed hos brugere med nedsat siddendebalance.

Anvendelse af produktet:

Produktet placeres i kørestol eller på bilsæde hos brugere med behov for støtte til at komme bagud på sædet.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for

den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - One Way

Indholdsfortegnelse

Placering af One Way Open:	side 2
Placering og brug af One Way Tube:	side 2
Forflytning bagud aktiv bruger - Åben ryg - One Way Open:	side 2
Forflytning bagud mindre aktiv bruger - Åben ryg - One Way Open:	side 3
Forflytning bagud - Lukket ryg - One Way Open:	side 3
Replacering af One Way Open:	side 3
Tekniske specifikationer	side 4



Brugervejledning - One Way

Placering af One Way Open:



1. Placer One Way Open med undersiden mod sædet således, at stykket med de 3 håndtag vender opad.



2. Fold One Way Open således, at etiketten "Denne side opad..." vender mod ryglænet. Fold således at øverste stykke er ca. 10 cm fra ryglænet.



3. Placer håndtagene bagud og væk fra siddefladen. Bruger sætter sig på det øverste lag af One Way Open.

Placering og brug af One Way Tube:



4. One Way Tube placeres med "Denne side opad..." op og med ca. 10 cm afstand til ryglænet.



5. Placer bruger ovenpå One Way Tube.



6. Med fødderne i underlaget og forudlænet kan bruger udnytte gliddet på Tubens inderside og skubbe sig bagud på sædet.

Forflytning bagud aktiv bruger - Åben ryg - One Way Open:



7. Sørg for at bruger har knæene hævet fra sædet fx ved at hæve brugers fodstøtter eller placere fx MC PMA-8090 Foot Master under brugers fødder.



8. Bruger læner sig fremad og støder fra med benene og evt. armene på armlænene.



9. Hjælper støtter ved at trække i hjørne eller midterste strop. Ved større brugere anbefales en Pull Strap.

Brugervejledning - One Way

Forflytning bagud mindre aktiv bruger - Åben ryg - One Way Open:



10. One Way - Pull Strap monteres i den bagerste strop på One Way Open.



11. Med god understøttelse af fødderne og overkroppen lænet fremad, trækker hjælperen i One Way - Pull Strap. Bruger støder fra med fødderne hvis muligt.
Er bruger stor kan 2 stk One Way - Pull Strap monteres - én i hver side.



12. Alternativ kan hjælper træde ned i One Way - Pull Strap for at hjælpe bruger bagud.

Forflytning bagud - Lukket ryg - One Way Open:



13. Hvis det ikke er muligt at trække stropperne mellem sæde og ryg trækkes bruger bagud via håndtagene på siden.



14. Alternativt kan hjælper støtte/ skubbe på brugers knæ, mens bruger læner sig fremad.

Replacering af One Way Open:



15. Efter 2-3 forflytninger bagud kan det være nødvendigt at replacere One Way Open, for at have fuld funktion af produktet.

Brugervejledning - One Way

Tekniske specifikationer

Materialer:

Polyester, Mohair, Nylon

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstørs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Varenummer - Navn	Størrelse:	Antal håndtag:	Max. Brugervægt:
MC 001-1266 One Way Open - S	L 105 x B 40 cm	5	200 kg
MC 001-1272 One Way Open - M	L 115 x B 50 cm	5	200 kg
MC 001-1276 One Way Open - L	L 125 x B 60 cm	5	200 kg
MC 001-1277 One Way Open - Pull Strap	L 49 x B 2,5 cm	1	160 kg
MC 001-1286 One Way Tube - S	L 40 x B 40 cm	0	200 kg
MC 001-1291 One Way Tube - M	L 50 x B 50 cm	0	200 kg
MC 001-1296 One Way Tube - L	L 60 x B 60 cm	0	200 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på stolekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 200 kg.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 40 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnligt og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Find os på:

