

MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

40_20231010_DK

Engangsovertræk



MC 002-1251



MC 002-1265



MC 002-1520



Vare nr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 002-1251	82346	Engangsovertræk Master Board 210x52	5744001971871
MC 002-1265	102680	Engangsovertræk Master Board 130x56	5744001971888
MC 002-1520	82354	Engangsovertræk Vision Board 100x60	5744001972113

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 25

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



master-care.dk



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet kan benyttes på boardet udover Nylon Coveret. Produktet sikrer høj hygiejne ved overflytninger. Produktet trækkes udover overflytningsboardet, så bruger ikke har direkte kontakt med dette under forflytning.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Advarsel:

Efterlad ikke produktet på gulvet grundet øget risiko for fald. Efterlad ikke produktet under bruger i længere tid da dette kan medføre varmeophobning og fugtigt miljø mod huden.

Anvendelse af produktet:

Engangsovertrækket monteres udenom overflytningsboardet. Den glatte inderside optimerer gliddet under forflytningen og højner

hygiejne forholdene eftersom bruger ikke kommer i direkte kontakt med overflytningsboardet.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet er et engangsprodukt (SPU), som kan bruges flere gange til samme patient, hvis de hygiejniske forhold tillader dette. Produktet tåler aftørring med sprit. Ved længere tids opbevaring anbefales opbevaring i original emballage og ved middel temperatur.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

Overflytning med Master Board/Vision Board:



1. Før engangsovertrækket ud over det valgte Master Board eller Vision Board. Vend bruger over på siden og placer Board incl. engangsovertrækket under brugeren.



2. Vend brugeren retur til rygleje på boardet. Bed evt. brugeren løfte hovedet og bøje benene, så der kan hjælpes til under forflytningen.



3. Udfør den sideværts liggende forflytning. engangsovertrækket glider let udenpå boardet, sammen med Nylon Cover. Boardet flyttes let væk efterfølgende. Klip evt engangsovertrækket op, hvis dette er lettere.



Tekniske specifikationer

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

Materialer:

MD PE



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

Opbevaring:

Opbevaring i original indpakning ved middel temperatur anbefales.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler. Produktet kan sorteres som LDPE.



Eftersyn:

Produktet er til Single Patient Use og kan bruges flere gange til samme patient, hvis det vurderes hygiejnemæssigt forsvarligt. Produkter, med høj friktion eller som er i stykker, skal kasseres.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

