

MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

(NL) Handleiding

02_20240103_NL

Nylon Master



MC 001-1101



MC 001-1106



MC 001-1204



MC 001-1206




MC 001-1220



MC 001-1271



Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1

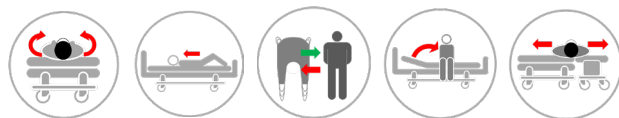

	Artikel nr.	HMI nr.	Naam - Maat	UDI-DI/GTIN
<input type="radio"/>	MC 001-1101	34304	Nylon Master Tube - XS	5744001970171
<input type="radio"/>	MC 001-1102	34305	Nylon Master Tube - S	5744001970188
<input type="radio"/>	MC 001-1103	34306	Nylon Master Tube - M	5744001970195
<input type="radio"/>	MC 001-1104	34307	Nylon Master Tube - L	5744001970201
<input type="radio"/>	MC 001-1106	81812	Nylon Master Tube - Basic	5744001973097
<input type="radio"/>	MC 001-1111	121182	Nylon Ultra	5744001970225
<input type="radio"/>	MC 001-1201	34300	Nylon Master Open - XS	5744001973103
<input type="radio"/>	MC 001-1202	34301	Nylon Master Open - S	5744001970232
<input type="radio"/>	MC 001-1203	34302	Nylon Master Open - M	5744001970249
<input type="radio"/>	MC 001-1204	34303	Nylon Master Open - L	5744001970256
<input type="radio"/>	MC 001-1206	101812	Nylon Master Open - Overlock	5744001970263
<input type="radio"/>	MC 001-1210	33232	Slide Master Nylon Padded - S	5744001973127
<input type="radio"/>	MC 001-1220	33233	Slide Master Nylon Padded - M	5744001970270
<input type="radio"/>	MC 001-1271	39025	Slide Master Nylon Padded - Wide	5744001973134

ISO 12 31 03 21

The Original Nordic Human Handling Concept



Developed & Manufactured by:



Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

MDR (EU) 2017/745:

Producten in deze handleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Regulation MDR(EU) 2017/745-Klasse 1.

Het beoogde gebruik van het product/de producten:

Het product wordt gebruikt in twee lagen, tunnel of opgevouwen stof om wrijving te verminderen voor gebruikers met een functiebeperking, bijvoorbeeld bij het bewegen, aankleden of tijdens training. Het product kan worden gebruikt om het risico op schuifschade te minimaliseren.

Correct gebruik van het product:

Place the product under the points where the friction needs to be reduced. Always use the double-layered product to achieve maximum friction reduction. Always remove the product from under the user after use to minimize the risk of falling and overheating of the skin.

Waarschuwing:

Maak altijd een risicobeoordeling voordat u het product gebruikt, vooral als het product wordt gebruikt onder het steunvlak van de gebruiker in een zittende positie op bijvoorbeeld de rand van het bed. Zorg er altijd voor dat de gebruiker voldoende steun onder de voeten heeft bij het zitten als er een nylon stuk onder de billen wordt geplaatst. Laat het product nooit op de grond liggen, dit kan een risico op vallen oplev-

eren.

Risico beoordeling:

Maak Altijd een risico- en functionele beoordeling van de gebruiker voordat u het product gebruikt.

Op deze manier is het gebruik van het product voor het aankleden van de gebruiker ergonomisch en juridisch verantwoord.

Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van master care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

Levensduur:

De verwachte levensduur van producten van nylon glijmateriaal bij dagelijkse gebruik en gemiddeld wassen is 1-3 jaar. De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, gewicht client en hoe en hoe vaak het product wordt gewassen en gedroogd.

Producten met onvoldoende wrijvingsvermindering, defecte naden, beschadigd materiaal of andere gebreken moeten worden weggegooid en z.n. vervangen. Zo wordt een gezonde – en veilige werkomgeving voor zowel de hulpverlener als gebruiker behouden.

Voor regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik.

Garantie:

master care A/S en Distributeur biedt een Garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten als het product correct gebruikt wordt.

Onbedoelde gebeurtenissen en verwondingen bij verkeerd gebruik: Onbedoelde gebeurtenissen /verwondingen moeten altijd worden gemeld aan de bevoegde nationale autoriteit en aan master care A/S via de distributeur in het huidige land.

master care A/S en onze Distributeurs, zoals Solutions2Care BV, nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of productschade als het product en/of producten zijn gebruikt in strijd met het door de fabrikant aanbevolen beoogde doel of correct gebruik van het product(en).



Handleiding - Nylon Master

Inhoudsopgave

Aanbrengen van de Nylon Master/Slide Master:	bladzijde 2
Draaien in bed met de Nylon Master / Slide Master:	bladzijde 2
Hogerop in bed plaatsen met de Nylon Master/Slide Master:	bladzijde 2
Gebruik van Nylon Master om benen te buigen:	bladzijde 3
Verplaats het kussen met behulp van Nylon Master:	bladzijde 3
Verwijderen van de Nylon Master/Slide Master:	bladzijde 3
Technische specificaties	bladzijde 4



Handleiding - Nylon Master

Aanbrengen van de Nylon Master/Slide Master:



1. Nodig gebruiker uit 't been te buigen en draait via het vastpakken bedhek op de zij. De Nylon Master en/of Slide Master vouwen en onder drukpunten van de gebruiker schuiven.



2. Gebruiker houdt bedhek vast en helper pakt Nylon Master/Slide Master vast en strijkt het glad.



3. Gebruiker keert terug naar rugligging. De Nylon Master/Slide Master is nu correct onder de gebruiker gepositioneerd (schouders, romp, bips) en de wrijving onder de drukpunten van de gebruiker is verminderd.

Draaien in bed met de Nylon Master / Slide Master:



4. Nylon Master/Slide Master wordt onder de drukpunten van de gebruiker geplaatst.



5. Draai de gebruiker naar de zijpositie. Sta in schredestand, een been voor en een been achter (in de richting van de beweging), en trek voorzichtig aan de bovenlaag van de Nylon Master/Slide Master terwijl de gebruiker op de zij draait.



6. Gebruiker buigt de benen. Helper plaatst een hand onder de heup van de gebruiker en de andere hand wordt op het bovenbeen geplaatst om de gebruiker op de zij te rollen.

Hogerop in bed plaatsen met de Nylon Master/Slide Master:



7. Plaats de Nylon Master/Slide Master met de rolrichting naar boven (opening tunnel aan de zijkant). Zorg dat deze de schouder en het bekken bedekt.



8. Gebruiker buigt de benen en zet af en tilt het bekken op. Bij het wegglijden van de voeten kan een antislipmat worden gebruikt, en/of de helper houdt de voeten tegen.

Handleiding - Nylon Master

Gebruik van Nylon Master om benen te buigen:



9. Nylon Master/Slide Master wordt onder het onderbeen/voet van de gebruiker geplaatst met de plooi naar het lichaam gericht. Gebruik een kniebuiging en holte boven de hiel om de nylon master te plaatsen.

Ondersteun de voet/knie terwijl het been gebogen is door op de Nylon Master te schuiven.

Verplaats het kussen met behulp van Nylon Master:



10. Ideaal voor gebruikers met een zwaar hoofd of die hun hoofd in het kussen drukken.

Plaats de Nylon Master tussen het hoofd en het kussen van de gebruiker. Ondersteun de gebruiker onder het hoofd en verplaats het kussen.

Verwijderen van de Nylon Master/Slide Master:



11. Duw de Nylon Master/Slide Master aan één kant onder de gebruiker – gebruik de holtes.



12. Aan de andere kant van het bed grijpt de helper de onderste laag van de Nylon Master / Slide Master vast.



13. De helper trekt de Nylon Master/Slide Master er onderuit door gewichtsoverdracht zodat de ene laag over de ander laag kan bewegen.

Handleiding - Nylon Master

Technische specificaties

Materiaal:

Nylon Master: Nylon

Slide Master Gepolsterd: Nylon, polyester

ISO certificeringen:

ISO 12952-1:2015

Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - smeulende sigaret voor ontstekingsbron.

Artikel nr. - Product Naam:

Maat:

Max. gebruikers gewicht:

Artikel nr. - Product Naam:	Maat:	Max. gebruikers gewicht:
MC 001-1101 Nylon Master Tube - XS	L 30 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1102 Nylon Master Tube - S	L 60 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1103 Nylon Master Tube - M	L 80 x B 80 cm	180 kg
MC 001-1104 Nylon Master Tube - L	L 100 x B 80 cm	180 kg
MC 001-1106 Nylon Master Tube - Basic	L 75 x B 70 cm	180 kg
MC 001-1111 Nylon Ultra	L 120 x B 120 cm	180 kg
MC 001-1201 Nylon Master Open - XS	L 30 x B 120 cm	180 kg
MC 001-1202 Nylon Master Open - S	L 60 x B 120 cm	180 kg
MC 001-1203 Nylon Master Open - M	L 80 x B 160 cm	180 kg
MC 001-1204 Nylon Master Open - L	L 100 x B 160 cm	180 kg
MC 001-1206 Nylon Master Open - Overlock	L 80 x B 160 cm	180 kg
MC 001-1210 Slide Master Nylon Padded - S	L 30 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1220 Slide Master Nylon Padded - M	L 50 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1271 Slide Master Nylon Padded - Wide	L 60 x B 100 cm	180 kg

Waarschuwing



Laat de gebruiker nooit alleen achter op het product wanneer het op de rand van het bed ligt.



Verlaat het product nooit op de vloer.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geactiveerd zijn voordat u de gebruiker overplaatst



CE- certificatie:

it product is CE-goedgekeurd en voldoet aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 kl. 1.

Voor meer informatie, video's, quick gids zie onze websites.



Gebruikersgewicht:

Advies max. gebruikersgewicht: 180 kg.



Wassen:

Dit product kan in de wasmachine op max. 85 °C worden gewassen. Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9.



Wasverzachter:

Gebruik *nooit* wasverzachter, dit vermindert de glij-eigenschappen aanzienlijk.



Droogtrommel:

Dit product mag alleen voorzichtig op max. 40°C worden gedroogd. Aan de lucht drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Oppervlakte reiniging:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met een natte doek en zeep.



Ontsmettingsmiddelen:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH waarde tussen 5-9.



Strijken:

Niet strijken.



Stomerij:

Niet stomen.



Bleken:

Niet bleken.



Onderhoud:

Over regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden of banden. Producten met hoge wrijving of andere tekortkomingen moeten worden weggegooid en z.n. vervangen.



Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggooien van het product.

Vind ons op:



Distributeur:

Solution?Care

