

MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

(NL) Handleiding

03_20230511_NL

Hand Master



MC 001-1002



Artikel nr.	HMI nr.	Naam - Maat	UDI-DI/GTIN
MC 001-1002	86521	Hand Master - Grey	574400197003

Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1



ISO 12 31 03 20

The Original Nordic Human Handling Concept



Distributeur:

Solution  Care

Developed & Manufactured by:



Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

MDR (EU) 2017/745:

Producten in deze handleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Regulation MDR(EU) 2017/745-Klasse 1.

Het beoogde gebruik van het product/de producten:

Het product wordt gebruikt om wrijving te verminderen voor gebruikers met een functiebeperking, bijvoorbeeld bij het bewegen, aankleden of tijdens training. Het product kan worden gebruikt om het risico op schuifschade te minimaliseren.

Correct gebruik van het product:

Het product kan worden gebruikt om een gebruiker achteruit te laten glijden in bijvoorbeeld een rolstoel, om wrijving tijdens het draaien in bed te verminderen en/of om schuifflappen op matrasbeschermers recht te trekken.

Waarschuwing:

Laat het product niet lang onder de gebruiker liggen, aangezien dit ongewenste veranderingen in het microklimaat van de huid kan veroorzaken. En laat het product niet op de grond liggen, dit kan ervoor

zorgen dat het valt.

Risico beoordeling:

Maak Altijd een risico- en functionele beoordeling van de gebruiker voordat u het product gebruikt.

Op deze manier is het gebruik van het product voor het aankleden van de gebruiker ergonomisch en juridisch verantwoord.

Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van master care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

Levensduur:

Het product heeft naar verwachting een levensduur van 1-3 jaar bij normaal gebruik en wassen. De levensduur van het product is afhankelijk van het gebruik, de belasting en hoe vaak het product wordt gewassen en gedroogd.

Producten moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Producten die niet langer voldoende wrijvingsvermindering bieden voor een gezonde beweging voor zowel helper als gebruiker, moeten worden weggegooid. Als het product defecte stiksels of gebroken oppervlakken heeft, moet het product worden weggegooid.

Garantie:

master care A/S en Distributeur biedt een Garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten als het product correct gebruikt wordt.

Onbedoelde gebeurtenissen en verwondingen bij verkeerd gebruik: Onbedoelde gebeurtenissen /verwondingen moeten altijd worden gemeld aan de bevoegde nationale autoriteit en aan master care A/S via de distributeur in het huidige land.



Handleiding - Hand Master

Inhoudsopgave

Verplaatsen van de actieve gebruiker achterin de stoel door 1 helper:	bladzijde 2
Gedeeltelijke actieve gebruiker van houding (zijligging) veranderen op het laken door 1 helper:	bladzijde 2
Schuifflappen op matrashoes weg halen of plaatsen zonder liftgebruik door 1 helper:	bladzijde 3
Technische specificaties	bladzijde 4



Handleiding - Hand Master

Verplaatsen van de actieve gebruiker achterin de stoel door 1 helper:



1. Helper plaatst de hand in de Hand Master.



2. Vraag de gebruiker naar de zijkant, bijvoorbeeld tegen de armluning te leunen om het zitvlak te ontlasten.



3. Met de handpalm naar boven wordt de hand met de Hand Master onder de iets opgetilde bil geleid.



4. Vraag de gebruiker om met de bil tegen de Hand Master te drukken en zichzelf naar achteren te duwen. Helper duwt lichtjes met de andere hand op de knie van de gebruiker.



5. Tegelijkertijd duwt de helper de hand met de Hand Master naar achteren, waardoor de gebruiker achteruit in de stoel beweegt. Het proces wordt aan de andere kant herhaald, zodat de gebruiker rechtop gaat zitten.

Gedeeltelijke actieve gebruiker van houding (zijligging) veranderen op het laken door 1 helper:



6. De helper plaatst hand in Hand Master. De actieve gebruiker buigt beide benen en stemt er, indien mogelijk, iets mee af. Helper plaatst de hand met de Hand Master onder de heup.



7. De helper plaatst de andere hand op de tegenovergestelde heup/dij. Schuif de zorgvrager naar zijligging door het bekken naar achteren te schuiven. Gebruik de glijdende eigenschappen van de Hand Master. De benen van de gebruiker kunnen als hefboom worden gebruikt.



8. Helper trekt de handpalm uit de Hand Master en grijpt de losse Hand Master, en trekt hem uit.

Handleiding - Hand Master

Schuifflappen op matrashoes weg halen of plaatsen zonder liftgebruik door 1 helper:



9. Til de schuifflap op en plaats deze opgevouwen tussen de matrashoes en de Master Turner. Breng Hand Master aan op één of beide handen.



10. Plaats de handpalmen in het midden van de schuifflap en schuif de schuifflap onder de gebruiker door de hand(en) naar voren en naar de zijkanten te bewegen. Voel je vrij om meerdere keren te herhalen. Stop met het plaatsen van de witte riemen bovenop de flap - gebruik de lichaamsholte.



11. Als de schuifflap is ingeschoven, wordt de zorgvrager licht zijwaarts naar de helper bewogen. Aan de andere kant wordt de schuifflap uitgetrokken en wordt het klittenband aan de matrashoes bevestigd.

Handleiding - Hand Master

Technische specificaties

Materiaal:
Nylon

ISO certificeringen:

ISO 12952-1:2015

Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - smeulende sigaret voor ontstekingsbron.

Artikel nr. - Product Naam:

Maat:

MC 001-1002 Hand Master - Grey	L 50 x W 18 cm		
--------------------------------	----------------	--	--

Waarschuwing



Laat de gebruiker nooit alleen achter op het product wanneer het op de rand van het bed ligt.



Verlaat het product nooit op de vloer.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geactiveerd zijn voordat u de gebruiker overplaatst



CE- certificatie:

it product is CE-goedgekeurd en voldoet aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 kl. 1.

Gebruikersgewicht:

Het max. gebruikersgewicht is afhankelijk van functionaliteit gebruiker en soort transfer. Alle transfers moeten goed en gezond zijn voor gebruiker en helper.



Droogtrommel:

Dit product mag alleen voorzichtig op max. 40°C worden gedroogd. Aan de lucht drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Wassen:

Dit product kan in de wasmachine op max. 85°C worden gewassen. Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Oppervlakte reiniging:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met een natte doek en zeep.



Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9.



Bleken:

Niet bleken.



Wasverzachter:

Gebruik *nooit* wasverzachter, dit vermindert de glij-eigenschappen aanzienlijk.



Onderhoud:

Over regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden of banden. Producten met hoge wrijving of andere tekortkomingen moeten worden weggegooid en z.n. vervangen



Strijken:

Niet strijken.



Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



Stomerij:

Niet stomen.



Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggooien van het product.



Ontsmetten:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH waarde tussen 5-9.

Vind ons op:

