

MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

(NL) Handleiding

29_20230511_NL

Turn Master



Turn Master
(Voorkant)



Turn Master Multi
(Achterkant)



Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1



Artikel nr.	HMI-nr.	Naam - Maat:	UDI-DI/GTIN
○ MC 001-9040	39010	Turn Master Classic - S	5744001971758
○ MC 001-9041	55563	Turn Master Multi - S	5744001973363
○ MC 001-9050	39011	Turn Master Classic - M	5744001971765
○ MC 001-9051	55564	Turn Master Multi - M	5744001971772
○ MC 001-9060	39012	Turn Master Classic - L	5744001971789
○ MC 001-9061	55565	Turn Master Multi - L	5744001971796
○ MC 001-9070	45925	Turn Master Classic - XL	5744001973370
○ MC 001-9071	55566	Turn Master Multi - XL	5744001970157
○ MC 001-9080	45926	Turn Master Classic - XXL	5744001973387
○ MC 001-9081	55567	Turn Master Multi - XXL	5744001973394

ISO 12 12 81 01

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed & Manufactured by:



Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

MDR (EU) 2017/745:

Producten in deze handleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Regulation MDR(EU) 2017/745-Klasse 1.

Het beoogde gebruik van het product/de producten:

Het beoogde doel van dit product is het verplaatsen van en naar zit- of ligoppervlakken. De twee gladde oppervlakken op elkaar verminderen de wrijving onder de gebruiker en maken het daardoor gemakkelijker om naar een andere positie in bed/stoel te schuiven of te draaien.

Correct gebruik van het product:

Plaats het product op het beoogde oppervlak, bijvoorbeeld een bed met het bovenste gedeelte verspringend naar de rand van het bed. De twee nylon oppervlakken tegen elkaar verminderen de wrijving als de gebruiker draait en in bed glijdt.

Het Multi-model heeft handvatten aan de bovenzijde. Ze kunnen tijdens de overdracht door de helper of de gebruiker worden gebruikt.

Waarschuwing:

Laat een gebruiker met een slechte zitbalans nooit alleen op de rand van het bed zitten op een Turn Master, aangezien dit het risico vergroot dat de gebruiker op de vloer glijdt.

Zorg er altijd voor dat het oppervlak van de Turn Master overeenkomt met de behoeften van de gebruiker om het risico op schuifwonden te voorkomen.

Controleer altijd of het klittenband niet verdraaid is, omdat dit oncomfortabel kan zijn en na verloop van tijd de basis van decubitus kan vormen.

Risico beoordeling:

Maak Altijd een risico- en functionele beoordeling van de gebruiker voordat u het product gebruikt.

Op deze manier is het gebruik van het product voor het aankleden van de gebruiker ergonomisch en juridisch verantwoord.

Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van master care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

Levensduur:

De verwachte levensduur van producten met nylon glijmateriaal bij dagelijks gebruik en gemiddeld wassen is 1-3 jaar. De levensduur van het product hangt af van het gebruik, de belading van de gebruiker, de was- en droogtemperaturen en hoe vaak het wordt gewassen en gedroogd.

Producten met onvoldoende wrijvingsvermindering, defecte naden, gebroken materiaal of andere gebreken moeten worden weggegooid. Zo behoud je altijd een veilig en gezonde werkomgeving voor zowel hulpverlener als gebruiker. Voer regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik.

Garantie:

master care A/S en Distributeur biedt een Garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten als het product correct gebruikt wordt.

Onbedoelde gebeurtenissen en verwondingen bij verkeerd gebruik:

Onbedoelde gebeurtenissen /verwondingen moeten altijd worden gemeld aan de bevoegde nationale autoriteit en aan master care A/S via de distributeur in het huidige land.

master care A/S en onze Distributeurs, zoals Solutions2Care BV, nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of productschade als het product en/of producten zijn gebruikt in strijd met het door de fabrikant aanbevolen beoogde doel of correct gebruik van het product(en).

Handleiding - Turn Master

Inhoudsopgave

In en uit de auto draaien:	bladzijde 2
Draai en schuif naar de achterkant van de stoel. Dit betekent dat u met de Turn Master in de stoel glijdt: . . .	bladzijde 2
Draaien in bed:	bladzijde 3
Verwijder de Turn Master van het bed:	bladzijde 3
Technische specificaties	bladzijde 4




Handleiding - Turn Master


In en uit de auto draaien:




1. Als u alleen wilt dat de Turn Master roteert, moet de klitterbandriem aan de onderkant van het antislip glijdende deel volledig zijn vergrendeld aan de rand van het draaikussen.

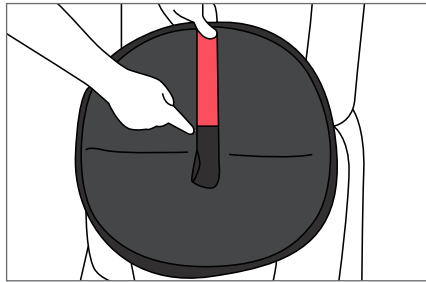

2. Als u de Turn Master nodig heeft om het zitgedeelte van de rand van de autostoel naar het midden van de stoel te verplaatsen en vervolgens het zitgedeelte helemaal naar achteren in de richting van de achterkant van de autostoel te bewegen, dan moet u de klittenband riem losmaken en instellen naar behoefte.

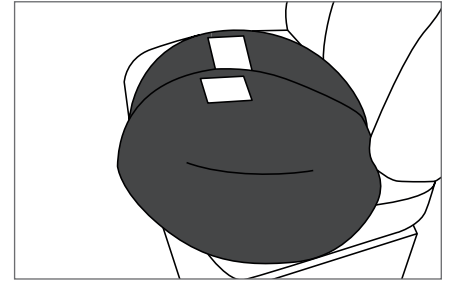


3. Als u de Turn Master nodig heeft om het zitgedeelte van de rand van de autostoel naar het midden van de stoel te verplaatsen en vervolgens het zitgedeelte helemaal naar achteren in de richting van de achterkant van de autostoel te bewegen, dan moet u de klittenband riem losmaken en instellen naar behoefte.

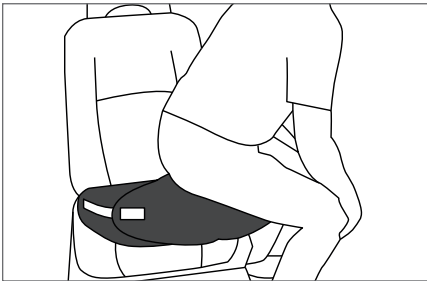

4. Ga de deur in met je rug naar de autostoel. Ga zitten op de Turn Master. 't Witte label met het opschrift 'Deze kant naar boven en tegen het achter/hoofdgedeelte' moet wijzen met de pijl naar de billen.




5. U kunt nu in het midden van de stoel naar binnen en naar achteren schuiven.

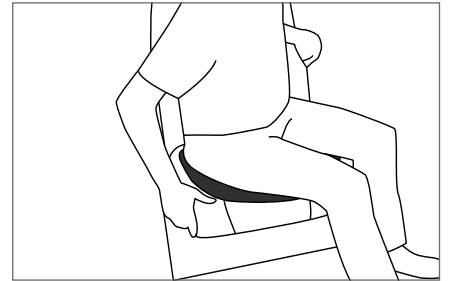


6. Draai en schuif naar de achterkant van de stoel. Dit betekent dat u met de Turn Master in de stoel glijdt.


Draai en schuif naar de achterkant van de stoel. Dit betekent dat u met de Turn Master in de stoel glijdt:

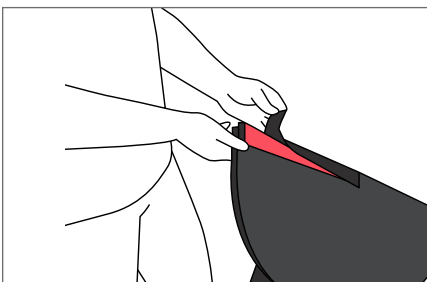

7. Sluit de klitterbandriem zodat de Master Turner Multi alleen kan draaien.

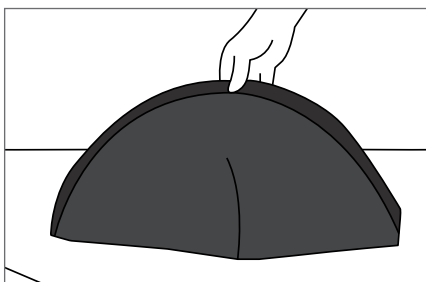


8. Plaats de Turn Master Multi op de stoel met het Anti/slip schuifdeel aan de onderkant.

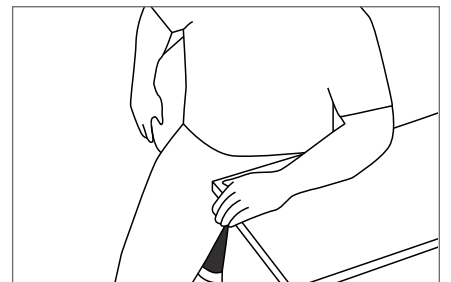


9. De gebruiker gaat op de Turn Master Multi zitten en kan ronddraaien op de stoel.

Handleiding - Turn Master


Draaien in bed:

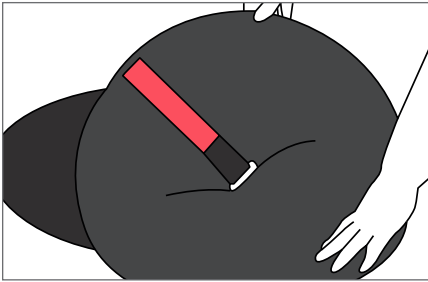


10. Indien flexibel bewegen gewenst is zodat de gebruiker zowel verder in het bed kan schuiven als aansluitend in bed kan draaien, wordt de klittenbandriem aan de achterzijde veresteld en wordt de hoogte van het bed aangepast aan de gebruiker.

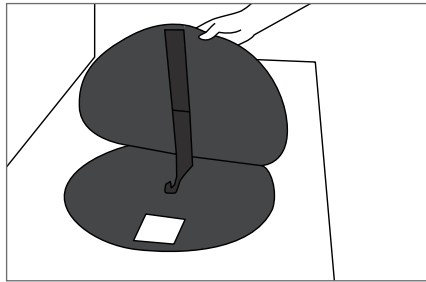


11. Plaats het onderste schuifdeel in het midden van het bed, met de antislip laag op het matras.

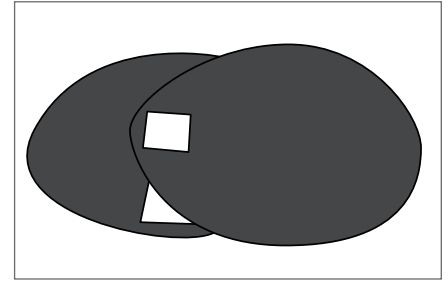


12. Verplaats het bovenste schuifdeel naar de rand van het bed. Het label 'Deze kant naar boven en in de richting van de rug/hoofdgedeelte' wijst nu naar het midden van het bed.

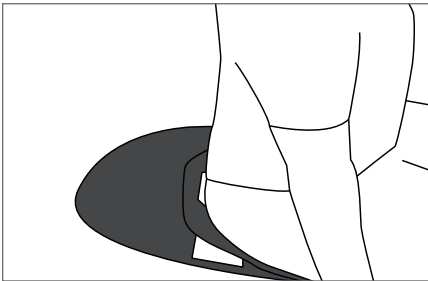

13. De gebruiker plaatst zichzelf op de Turn Master met de billen naar het label 'deze kant omhoog en naar het rug-/hoofdgedeelte' gericht.

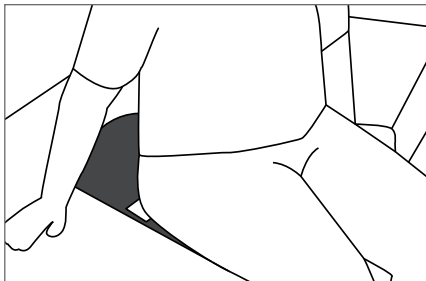


14. De gebruiker glijdt nu zonder hulp naar het midden van het bed, draait in en zwaait de benen in het bed. En glijdt z.n. naar de gewenste positie.

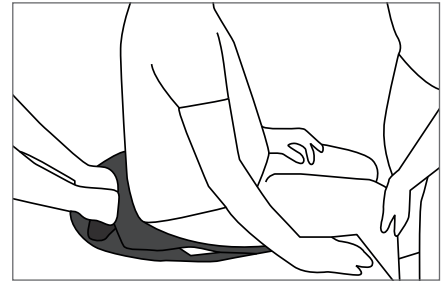


15. Bij de Turn Master kunnen de helpers de handvatten gebruiken en zo de gebruiker verder in bed helpen terwijl de andere helper de benen van de gebruiker z.n. ondersteunt.


Verwijder de Turn Master van het bed:

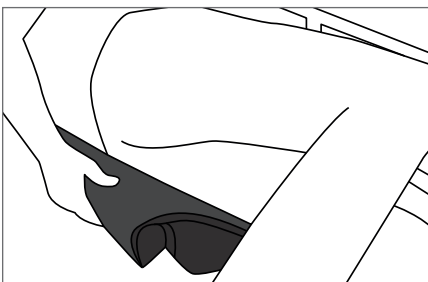

16. De gebruiker rolt naar één kant. Pakt beide glijdende delen van de Turn Master vast en rolt deze naar het lichaam toe.

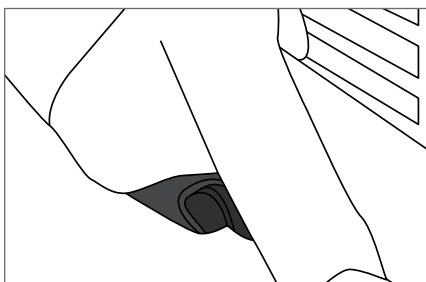

17. De gebruiker tilt vervolgens zijn lichaam naar de andere kant, over de opgerolde Turn Master.

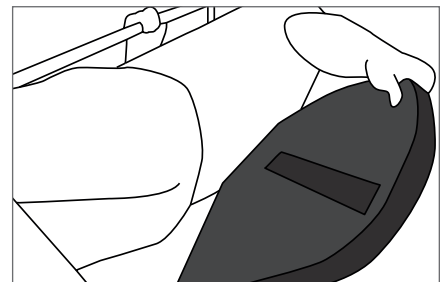

18. De gebruiker pakt de Turn Master achter de rug vast, vouwt hem op en trekt hem weg van het lichaam.

Handleiding - Turn Master

Technische specificaties

Materiaal:

Oppervlak: 100 % Polyester. Vulling: 50 % Cotton, 30 % Polyester, 20 % Bico fibers.

Handvatten: 100 % Polyester. Rand: 100 % Polyamide. Glijstof/onderkant: 100 % Special coated polyamide.

ISO certificeringen:

ISO 12952-1:2015

Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - smeulende sigaret voor ontstekingsbron.

Artikel nr. - Product Naam:	Maat:	Handgrepen:	Max. gebruikers gewicht:
MC 001-9040 Turn Master Classic - S	Dia.: 40 cm	0	160 kg
MC 001-9041 Turn Master Multi - S	Dia.: 40 cm	2	160 kg
MC 001-9050 Turn Master Classic - M	Dia.: 50 cm	0	160 kg
MC 001-9051 Turn Master Multi - M	Dia.: 50 cm	2	160 kg
MC 001-9060 Turn Master Classic - L	Dia.: 60 cm	0	160 kg
MC 001-9061 Turn Master Multi - L	Dia.: 60 cm	2	160 kg
MC 001-9070 Turn Master Classic - XL	Dia.: 70 cm	0	160 kg
MC 001-9071 Turn Master Multi - XL	Dia.: 70 cm	2	160 kg
MC 001-9080 Turn Master Classic - XXL	Dia.: 80 cm	0	160 kg
MC 001-9081 Turn Master Multi - XXL	Dia.: 80 cm	2	160 kg

Waarschuwing



Laat de gebruiker nooit alleen achter op het product wanneer het op de rand van het bed ligt.



Verlaat het product nooit op de vloer.



Zorg er Altijd voor dat gebruiker niet verstrikt raakt in lussen/banden.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geactiveerd zijn voordat u de gebruiker overplaasts



CE- certificatie:

it product is CE-goedgekeurd en voldoet aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 kl. 1.

Voor meer informatie, video's, quick gids zie onze websites.



Gebruikersgewicht:

Advies max. gebruikersgewicht: 160 kg.



Wassen:

Dit product kan in de wasmachine op max. 40 °C worden gewassen. Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9.



Wasverzachter:

Gebruik *nooit* wasverzachter, dit vermindert de glij-eigenschappen aanzienlijk.



Droogtrommel:

Dit product mag alleen voorzichtig op max. 40°C worden gedroogd. Aan de lucht drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Oppervlakte reiniging:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met een natte doek en zeep.



Ontsmettingsmiddelen:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH waarde tussen 5-9.



Strijken:

Niet strijken.



Stomerij:

Niet stomen.



Bleken:

Niet bleken.



Onderhoud:

Over regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden of banden. Producten met hoge wrijving of andere tekortkomingen moeten worden weggegooid en z.n. vervangen.



Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggooiden van het product.

Vind ons op:



Distributeur:

SolutionCare

