

Master TURNER

ILF Large

BRUGERVEJLEDNING



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt	Vare
MC 001-1500	46872	Master TURNER ILF Large	Soft	L 215 x B 145 cm	L	1200 g	
MC 001-1502	50287	Master TURNER ILF Two In One Large	Soft	L 215 x B 145 cm	L	2300 g	

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master TURNER ILF Large



A. Montering af Master TURNER ILF Large




1A) Du har nu monteret det valgte madrascover på sengemadrassen. Sørg for, at stropperne ligger i højre side af sengen



2A) Placer nu Master TURNER ILF med den sorte glatte del vendt mod madrascoveret, og etikken "Denne side op mod hovedenden" vender mod sengens hovedgavl




B. Vending i seng med lift

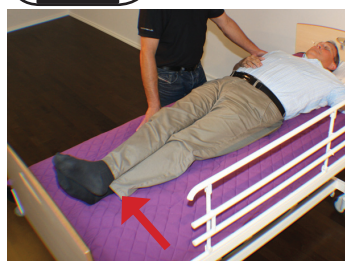

1B) Kryds/bøj brugerens ben, og træk hovedpude og skulder frem




2B) Montér Master TURNER ILF's stropper på liftens åg, og elever sengehest

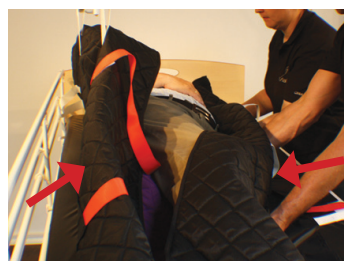

3B) Brugeren liftes ca. 20 grader op fra underlaget, og hjælperen skubber brugeren mod fjerneste sengekant, over mod sengehesten.



4B) Nu vendes brugeren om på siden ved hjælp af Master TURNER og lift. Brugeren lejres og liftens kobles fra Master TURNER

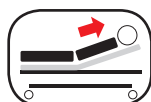

C. Højere op i seng



1C) Elever fodenden på sengen



2C) Hjælperne stiller sig på begge sider af sengen, og griber fat i Master TURNER ILF. Ved hjælp af vægtoverføring trækkes brugeren højere op i seng. Det er vigtigt af glideflapperne under brugerens ikke er fjernet

Master TURNER

ILF Large



D. Op at sidde i seng



1D) Aktiver knækket på sengen ved brugerens knæ, og fjern glideplappen på Master TURNER ILF



2D) Elever hovedgærdet på sengen




3D) Rul evt. begge sider af Master TURNER ILF ind mod brugeren og ned langs brugerens krop



E. Op at sidde på sengekant



1E) Aktiver knækket på sengen ved brugerens knæ, og elever hovedgærdet på sengen. Monter liften på Master TURNER ILF's stropper ved hoveddelen og lift op til Master TURNER ILF er stram bag brugerens ryg.

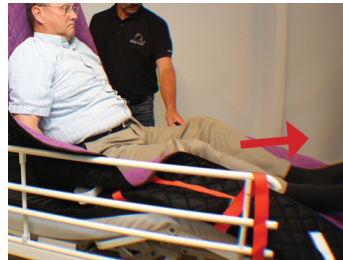

2E) Sænk hoveddelen på sengen. Glid brugerens ben ud over sengekanten



3E) Brugeren sidder nu på sengekanten med Master TURNER ILF som rygstøtte



4E) For at undgå fremadglidning kan glideflappen på Master TURNER ILF fjernes, således antiskrid fremkommer

Master TURNER

Vaskeanvisning

ILF Large kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling


ILF Two In One kan vaskes ved 95 grader C




Kun skånsom tørretumbling

ADVARSEL Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

Max. belastning

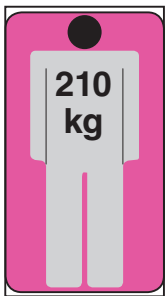

7 Punkts

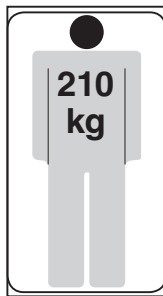

7 Punkts

Max. belastning pr. håndtag: 35 kg

VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

ADVARSEL

- Forlad aldrig bruger med liften hægtet på Master TURNER.
- Forlad aldrig bruger for tæt på sengemadrassens kant eller siddende ude ved eller på denne med Master TURNER.
- Forlad aldrig bruger liggende på Master TURNER, uden at sengeheste i sider er hævet.
- Anvend aldrig Master TURNER som et løftesejl ved at løfte bruger fra underlaget med denne tilkoblet en personløfter.

ILF Large

Produktbeskrivelse

Master TURNER ILF består af et liftbaseret glide- og vendelagen, der er specielt udviklet til at ligge direkte oven på vækselftrykmadrasser og sikrer optimal udnyttelse af madrassens egenskaber.

Master TURNER ILF har en blød hudvenlig jersey overflade, der er flammehæmmende samt elastisk. Er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og er vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der forebygger dannelsen af svampe og allergi.

For at undgå fugt i at gennemtrænge er Two In One modellen forsynet med en indvendig elastisk fugtspærre. Master TURNER ILF har en glat underside i specialfremstillet nylon med unikke glideegenskaber HLF (Hyper Low Friction) og har påsyet en låseflap, der gør det muligt at låse Master TURNER ILF uden brug af madrascover. Master TURNER ILF har flere håndtag, som giver mulighed for god håndtering. Master TURNER ILF har lang holdbarhed.

Anvendelse

Master TURNER ILF Large anvendes som et permanent liftbaseret glide- og vendelagen direkte oven på en vækselftrykmadrass. Anvendes til brugeren, der har behov for aflastning under hele kroppen samt behov for optimal udnyttelse af vækselftrykmadrassens effekt. Ved fjernelse af låseflappen låses brugeren under den nederste del af lårbenene og får derved mulighed for at elevere hovedgærdet uden risiko for nedglidning. Personalet kan ved brug af dets håndtag foretage manuelle forflytninger, og hvis bruger er tung eller modarbejdende, kan systemet tilkobles en hvilken som helst gulv- eller loftlift. Ved anvendelse af lift nedsættes arbejdsbelastningen for personalet væsentlig og gør forflytningerne mere behagelig for bruger. Som glideunderlag kan systemet anvendes ovenpå alle vores madrascover modeller. Two In One modellen er til den inkontinente bruger.

Fordele

- Har en tynd polstring for at forebygge varme
- Er allergiforbyggende
- Kan placeres direkte ovenpå trykaflastende madrasser med glat madrasbetæk
- Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlifte
- Giver mulighed for at komme op at sidde på sengekant ved hjælp af loftlift
- Leveres med mange håndtag for god håndtering
- Har unikke glideegenskaber - HLF (Hyper Low Friction), og er dermed tryksårsforebyggende, da risikoen for shear mindskes
- Two In One modellen har indvendig fugtspærre
- Lang holdbarhed