

# MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.



# (NL) Handleiding


19\_20231211\_NL

## Master Turner Royal - S

The **Original** Master Turner System



MC 001-1713

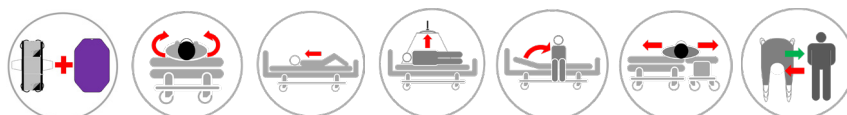

Artikel nr.	HMI nr.	Naam - Maat	UDI-DI/GTIN
MC 001-1713	131089	Master Turner Royal - S	5744001973912

Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1



ISO 12 31 03 21

The Original Nordic Human Handling Concept



Distributeur:

Solution  Care

Developed & Manufactured by:



# Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Producten in deze handleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Regulation MDR(EU) 2017/745-Klasse 1.

## **Het beoogde gebruik van het product/de producten:**

Het doel is om de wrijving tussen de gebruiker en het matras te verminderen, zodat de gebruiker met of zonder hulp van de helper gemakkelijk verplaatsingen binnen de grenzen van het bed kan uitvoeren (draaien, op de zij rollen en/of hogerop plaatsen in bed). Product moet altijd in combinatie met een matrashoes worden ingezet van master care A/S.

## **Correct gebruik van het product:**

master care's Master Turner vormt in combinatie met de Matrashoes van master care een omkeerbaar glijdekensysteem dat kan worden gebruikt door gebruikers met functiebeperking om de zelfredzaamheid te onderhouden, c.q. met begeleiding verplaatsingen in bed uit te voeren.

## **Risico beoordeling:**

Maak Altijd een risico- en functionele beoordeling van de gebruiker voordat u het product gebruikt.

Op deze manier is het gebruik van het product voor het aankleden van de gebruiker ergonomisch en juridisch verantwoord.

## **Kennis van het product/overdracht:**

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van master care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

## **Levensduur:**

De verwachte levensduur van producten van nylon glijmateriaal bij dagelijkse gebruik en gemiddeld wassen is 1-3 jaar. De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, gewicht client en hoe en hoe vaak het product wordt gewassen en gedroogd.

Producten met onvoldoende wrijvingsvermindering, defecte naden, beschadigd materiaal of andere gebreken moeten worden weggegooid en z.n. vervangen. Zo wordt een gezonde – en veilige werkomgeving voor zowel de hulpverlener als gebruiker behouden.

Voor regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik.

## **Garantie:**

master care A/S en Distributeur biedt een Garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten als het product correct gebruikt wordt.

Onbedoelde gebeurtenissen en verwondingen bij verkeerd gebruik: Onbedoelde gebeurtenissen /verwondingen moeten altijd worden gemeld aan de bevoegde nationale autoriteit en aan master care A/S via de distributeur in het huidige land.

master care A/S en onze Distributeurs, zoals Solutions2Care BV, nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of productschade als het product en/of producten zijn gebruikt in strijd met het door de fabrikant aanbevolen beoogde doel of correct gebruik van het product(en).



# Handleiding - Master Turner Royal - S

## Inhoudsopgave

Plaatsen van de Master Cover - S matrashoes en Master Turner - S: .....	bladzijde 2
Zelfstandig naar bed gaan met de Master Turner - S: .....	bladzijde 2
Zelfstandig of met helper en/of (plafond)lift met tweepuntsjuk op de zij draaien: .....	bladzijde 2
Voorkom naar beneden glijden: .....	bladzijde 3
Technische specificaties .....	bladzijde 4



# Handleiding - Master Turner Royal - S

## Plaatsen van de Master Cover - S matrashoes en Master Turner - S:



1. Bevestig het matrashoes – S op het matras.



2. Plaats de Master Turner - S met de nylon kant naar beneden en de paarse kant naar boven op het glijdende vlak.



3. Master Turner - S is nu klaar voor gebruik.

## Zelfstandig naar bed gaan met de Master Turner - S:



4. Plaats de Master Turner - S dwars op het bed zodat de handgrepen aan de zijkanten naar het hoofd- en voeteneind wijzen. Gebruiker zit op de rand van het bed in het midden van de Master Turner - S, met de billen goed op het bed.



5. De Master Turner - S kan om de heupen/bekken van de gebruiker worden gevouwen. Met de hand op het bedhek sorteert de gebruiker voor om zich op het bed te draaien. Gebruiker tilt de benen in bed.



6. Strek de Master Turner recht als deze om de gebruiker is gewikkeld.

## Zelfstandig of met helper en/of (plafond)lift met tweepuntsjuk op de zij draaien:



7. Zelfstandig draaien: de gebruiker kan het bedhek vastpakken en zich draaien om op de zij te gaan liggen. Het glijdende vlak i.c.m. de Master Turner - S, vermindert wrijving en maakt het draaien gemakkelijker. De Positioning Wedge – S wordt aanbevolen voor optimale ondersteuning, veiligheid en comfort



8. Draaien met één helper: De gebruiker grijpt de bedhek vast en begint met draaien. De helper grijpt de Master Turner – S vast en ondersteunt door middel van gewichtsoverdracht de draai naar zijligging. (Wig)kussens kunnen worden gebruikt voor optimale ondersteuning, veiligheid en comfort.



9. Draaien met (plafond)lift met tweepuntsjuk: Bevestig de handgrepen/lussen aan het tweepuntsjuk. De gebruiker helpt door het bedhek vast te pakken. De lift wordt omhoog geplaatst en ondersteunt hiermee het draaien op de zij. Ook hier kunnen kussens en wiggen zorgen voor optimale ondersteuning.

# Handleiding - Master Turner Royal - S

## Voorkom naar beneden glijden:



10. Gebruiker en/of assistent positioneert het bekken van de zorgvrager correct in het bed met de Master Turner - S. Het kan eventueel worden gecontroleerd door de beensteun omhoog te plaatsen tot onder de knieën.



11. Plaats de Positioning Wedges – XS, MC 001-8040 langs het dijbeen onder de Master Turner - S, met de antislip naar beneden. Plaats eventueel een Positioning Cushion tussen de voeten en het voeteneinde bed met ca. 5 cm lucht tussen het kussen en de voeten.



12. Plaats het bedhek omhoog. Voor extra stabiliteit/veiligheid kan aan weerszijden van het bovenlichaam Positioning Wedge - M, MC 001-8050 worden geplaatst.

# Handleiding - Master Turner Royal - S

## Technische specificaties

### Materiaal:

Katoen, Polyester, Polyamide, Nylon.

## ISO certificeringen:

ISO 12952-1:2015

Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - smeulende sigaret voor ontstekingsbron.

### Artikel nr. - Product Naam:

### Maat:

### Handgrepen: Max. gebruiker gewicht:

Artikel nr. - Product Naam:	Maat:	Handgrepen:	Max. gebruiker gewicht:
MC 001-1713 - Master Turner Royal - S	L 70 x B 130 cm	4	150 kg

## Waarschuwing



Laat de gebruiker nooit alleen achter op het product wanneer het op de rand van het bed ligt.



Verlaat het product nooit op de vloer.



Zorg er Altijd voor dat gebruiker niet verstrikt raakt in lussen/banden.



Laat client nooit alleen op 't product liggen terwijl het is aangesloten op een (plafond)lift.



Mag niet als tilband worden gebruikt! Alleen combineren met lift met tweepuntsjuk voor draaien in bed.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geactiveerd zijn voordat u de gebruiker overplaast



### CE- certificatie:

it product is CE-goedgekeurd en voldoet aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 kl. 1.

Voor meer informatie, video's, quick gids zie onze websites.



### Gebruikersgewicht:

Advies max. gebruikersgewicht: 150 kg.



### Wassen:

Dit product kan in de wasmachine op max. 85 °C worden gewassen. Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



### Wasverzachter:

Gebruik *nooit* wasverzachter, dit vermindert de glij-eigenschappen aanzienlijk.



### Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9.



### Droogtrommel:

Dit product mag alleen voorzichtig op max. 40°C worden gedroogd. Aan de lucht drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



### Oppervlakte reiniging:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met een natte doek en zeep.



### Ontsmettingsmiddelen:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH waarde tussen 5-9.



### Strijken:

Niet strijken.



### Stomerij:

Niet stomen.



### Bleken:

Niet bleken.



### Onderhoud:

Het product moet regelmatig en bij voorkeur voor elk gebruik worden gecontroleerd. Controleer of er geen schade aan de stof, banden/lussen, naden etc. Als het product hoge wrijving heeft of anderszins kapot is, moet het product worden weggegooid en z.n. worden vervangen.



### Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



### Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggooien van het product.

Vind ons op:



Distributeur:

Solution Care

