

# MADE IN EUROPE



# (DE) Gebrauchsanleitung

26\_20240104\_DE


## StayUp Strap

Unsere Produkte und Rohstoffe werden in Europa hergestellt.

Entscheiden Sie sich für Qualität, sparen Sie Geld und schonen Sie die Umwelt.



	Artikel-Nr.	HMI Nr.	Name	UDI-DI/GTIN	Größe
<input type="radio"/>	MC 001-1944	136866	StayUp Strap	5744001974827	L 75 x B 3,6 cm
<input type="radio"/>	MC 001-1943	-	StayUp Strap - 10 pcs	5744001974919	L 75 x B 3,6 cm

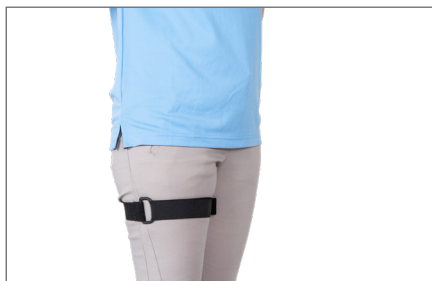

1. Der StayUp-Strap wird um den Oberschenkel an der Außenseite der Hose angebracht.



2. Führen Sie das Band durch den Kunststoffing.



3. Straffen Sie das Band und befestigen Sie den Klettverschluss am Gummiband.



4. Öffnen und lösen Sie die Hose. Die Hose kann nicht weiter als bis zum StayUp-Strap herunterrutschen. Unabhängig davon, ob beim Toilettengang gestanden oder gesessen wird, kann die Hose dadurch nicht auf den Boden fallen.

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



# Gebrauchsanleitung - StayUp Strap

Wir empfehlen Ihnen, die nachstehende Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt/die Produkte in Gebrauch nehmen.

Die Informationen in dieser Anleitung gelten für die gezeigten Produkte, sofern keine speziellen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen wurden und die Produkte wie in der Gebrauchsanleitung empfohlen verwendet werden. Wenn der Kunde Änderungen oder Reparaturen vornimmt oder das Produkt in anderen Kombinationen verwendet als von master care A/S empfohlen, verlieren die CE-Kennzeichnung und entsprechend auch die Garantie für das Produkt von master care A/S ihre Gültigkeit.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an master care A/S.

## MDR (EU) 2017/745:

Die dieser Gebrauchsanleitung erwähnten Produkte entsprechen den Standards der Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745 der Klasse 1 und sind entsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

## Erklärter Verwendungszweck des Produkts:

Verhindert, dass die Hose bei der Benutzung der Toilette auf den Boden fällt, wodurch ein Sturzrisiko minimiert wird.

## Risikobewertung:

Vor der Benutzung sollte für die Person, die das Produkt aktuell nutzt, eine Risiko- und Mobilitätsbewertung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Transfer in einer ergonomisch und rechtlich korrekten Weise durchgeführt wird.

## Produktkenntnis/Transfers:

Es ist wichtig, dass die pflegebedürftige Person/die Pflegekräfte eine Einweisung in den Gebrauch der Produkte erhalten und die Gebrauchsanleitung

gründlich gelesen haben. master care A/S bietet Schulungen für den Gebrauch der Produkte an, und auf unserer Website finden Sie für die meisten Produkte eine Anleitung.

## Lebensdauer:

Das Produkt hat bei normaler Abnutzung und Reinigung eine Lebensdauer von 1 bis 3 Jahren. Die Lebensdauer des Produkts hängt von der Verwendung, der Belastung und der Art und Häufigkeit des Waschens und Trocknens ab. Vergewissern Sie sich, dass das Band zwischen dem Klettverschluss und dem Gummiband ausreicht, um die Hose oben zu halten. Ist dies nicht der Fall oder ist das Produkt anderweitig beschädigt, ist es zu entsorgen.

## Garantie:

master care A/S gewährt bei sachgemäßer Anwendung des Produkts eine 2-jährige Garantie betreffend Material- und Herstellungsfehler.

## Unfälle und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch:

Unintended events must always be reported to the appropriate National Authority and to master care A/S or the distributor in the current country.

master care A/S and our distributors take no responsibility for personal injuries or product damages if the product(-s) have been used in contravention of the by the manufacturer recommended intended purpose or proper use of the product.

## WARNUNG



Der StayUP-Strap wird nach dem Gebrauch entfernt, um eine Veränderung bei der Zirkulation zu verhindern.



### CE-Kennzeichnung:

Die Produkte sind gemäß der geltenden Verordnung zur CE-Kennzeichnung zugelassen und entsprechen der Verordnung MDR (EU) 2017/745 für Medizinprodukte, Klasse 1.



### ISO klassifizierung:

ISO 12952-1:2015  
Textilien – Prüfung der Entflammbarkeit von Bettwaren – Teil 1: Glühende Zigarette.

ISO 09 09 09 01

Besuchen Sie für weitere Informationen, Videos, Kurzanleitung usw.  
[www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)



### Gewicht der pflegebedürftigen Person:

Kein maximales Benutzergewicht.



### Waschhinweise:

Dieses Produkt kann in der Waschmaschine bei maximal 60 °C gewaschen werden. Niedrigere Waschttemperaturen verlängern die Lebensdauer erheblich.



### pH-Wert des Waschmittels:

Wählen Sie Waschmittel/Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9.



### Weichspüler:

Verwenden Sie keinen Weichspüler, da dieser die Gleiteigenschaften deutlich verringert.



### Trocknen im Wäschetrockner:

Dieses Produkt nur schonend bei maximal 40 °C im Wäschetrockner trocknen.



### Oberflächliche Reinigung:

Dieses Produkt kann oberflächlich mit einem Tuch und Seife gereinigt werden.



### Desinfektion:

Dieses Produkt darf mit alkoholischen Desinfektionsmittelmischungen mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 abgewischt werden.



### Bügeln:

Darf nicht gebügelt werden



### Chemische Reinigung:

Darf nicht chemisch gereinigt werden.



### Bleichen:

Darf nicht gebleicht werden.



### Prüfung:

Das Produkt sollte regelmäßig und vorzugsweise vor jedem Gebrauch überprüft werden. Vergewissern Sie sich, dass das Band zwischen dem Klettverschluss und dem Gummiband ausreicht, um die Hose oben zu halten. Ist dies nicht der Fall oder ist das Produkt beschädigt, ist es zu entsorgen.



### Gebrauchsanleitung:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



### Entsorgung:

Das Produkt stets gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

